



1. Produit

Chariot Snoezelen avec écran LED

2. Code

21967010

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Ce chariot multisensoriel est idéal pour des personnes alitées ou étant un fauteuil roulant. L'écran LED se trouve à une hauteur adaptée. A utiliser en groupe et grâce à sa mobilité, également possible de déplacer les séances sensorielles dans d'autres pièces. Equipé d'une partie séparable avec colonne à bulles et miroirs. Ce chariot est compact et complet avec les fibres optiques, un projecteur de ciel étoilé et un projecteur Nenko LED et un diffuseur d'arômes avec mélanges d'arômes. Comprend un compartiment de rangement avec serrure, roulettes et poignées. En bois de bouleau vernis.

Dimensions : 65 cm profondeur x 60 cm largeur x 147 cm hauteur.



5. Stimulations Snoezelen

Voir, Sentir, Toucher, Entendre

1. Nom du produit

Lecteur DVD intégré

2. Code du produit

83002

1. Nom du produit

Diffuseur d' Arômes

2. Code du produit

15410170

3. Couleur

Blanc

4. Brève Description

Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles dans l'air et permet ainsi de profiter de tous les bienfaits thérapeutiques de la thérapie par les arômes.





5. Contenu

1x Diffuseur

1x Tampon de recharge (arômes non-inclus)

6. Stimulations Snoezelen

Sentir

7. Fonctionnement

- Déballez
- Mettez de l'huile essentielle sur le tampon
- Branchez et allumez

8. Description

Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles dans l'air et permet ainsi de profiter de tous les bienfaits thérapeutiques de la thérapie par les arômes. Fonctionne au moyen d'un ventilateur permettant aux huiles essentielles de s'évaporer efficacement de manière naturelle. Doté de deux vitesses pour une évaporation normale et accélérée. Design raffiné. Les huiles ne sont pas comprises. Une brise d'air vaporise les huiles essentielles en gardant leur parfum intact jusqu'à ce que l'huile soit épuisée. Ceci évite de chauffer l'huile, qui, en brûlant, peut changer de parfum et altérer ses propriétés. Comme ce diffuseur n'utilise pas de chaleur, on peut le laisser branché dans la journée, ou même pendant la nuit, sans aucun risque. Ceci peut être particulièrement utile en cas de rhume ou pour une chambre d'enfant.

9. Sécurité


- Surveillez l'usage de ce produit.
- Servez-vous de ce produit sur une surface plate et stable.

10. Caractéristiques Techniques

Dimensions : 16 x 11.5 cm diamètre

11. Installation

1. Déballez.
2. Vérifiez que l'appareil ne soit pas branché avant d'installer le tampon. Enlevez la cartouche de vaporisation du sac. Mettez l'huile sur la cartouche (une ou deux gouttes).
3. Tenez le tampon par les bords; insérez le tampon dans la base de l'appareil et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à la bloquer dans les encoches prévues à cet effet.
4. Placez l'appareil sur une surface qui n'obstrue pas l'arrivée d'air par la base de l'appareil.
5. Pour mettre en marche l'appareil ; branchez la prise électrique et mettez l'interrupteur frontal sur la position I ou II (en fonction de la vitesse de diffusion souhaitée).

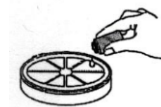

12. Soins et Entretien

- Avec la plupart des huiles essentielles, une seule goutte est suffisante sur un segment de la cartouche de vaporisation. Vous pouvez faire une marque sur le bord de ce segment de manière à utiliser chaque fois le même avec la même huile. Des huiles différentes peuvent être appliquées sur les autres segments.



- Pour changer d'huile, faites implémente fonctionner le diffuseur jusqu'à ce que le parfum de l'huile appliqué e ait disparu, puis verser une goutte d'une autre huile sur la cartouche. Une cartouche différente peut être utilisée pour des huiles différentes.
- Vous pouvez mélanger les huiles suivant vous goûts soit en appliquant plusieurs huiles sur la cartouche en même temps, soit en les mélangeant avant de les appliquer.

1. Nom du produit

Tampon de recharge pour diffuseur

2. Code du produit

16562170

- Pour garder une huile inutilisée mais déjà appliquée sur une cartouche, après utilisation remettez simplement la cartouche dans le sac que vous pouvez sceller manuellement.



1. Nom du produit

Mélange d'arômes Cosmic Chi - 5ml

2. Code du produit

12804170

3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts. Mélange d'arômes Rêve d'Elfes : floral, se compose des arômes d'Orange, Litsea, Orange et Frangipani est harmonisant et exaltant.



1. Nom du produit

Mélange d'arômes rêve d'elfes - 5ml

2. Code du produit

12057170

3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts.

Mélange d'arômes Rêve d'Elfes : floral, se compose des arômes d'Orange, Litsea, Orange et Frangipani est harmonisant et exaltant.



1. Nom du produit

Mélange d'arômes Fresh Mind - 5ml

2. Code du produit

12047170





3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts. Mélange d'arômes Esprit Frais : frais et herbeux, se compose des arômes de Citronnelle, de Menthe et de Cèdre, clarifiant et rafraîchissant.

1. Nom du produit

Mélange d'arômes Jasmin/Bergamote - 5ml

2. Code du produit

12069170



3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts. Mélange d'arômes Jasmin/Bergamote : floral et séduisant, se compose des arômes de Jasmin et Bergamote et Bezoe Siam, choyant, équilibrant et envoûtant.

1. Nom du produit

Projecteur Laser ciel étoilé

2. Code du produit

19908130

3. Couleur

Comme sur l'image



4. Brève Description

Vous n'avez pas besoin d'attendre que la nuit tombe, pour vivre la magie d'une nuit étoilée! Créez votre propre spectacle d'étoiles lumineux, scintillant et vertigineux! Design compact pouvant illuminer tout un plafond. Idéal pour un usage domestique. Attention ! Ne pas laisser allumé plus 4 heures consécutives (maximum) au risque de surchauffement.

Dimensions approximatives : 29 x 25 x 21 cm.

Réglable. Ne nécessite aucune configuration. Interrupteur ON/OFF. Fonctionne sur secteur(ne fonctionne pas avec la télécommande).

Adaptateur secteur inclus. Ne pas laisser à portée des enfants sans surveillance.

5. Stimulations Snoezelen

Vue

6. Installation

L'utilisation optimale de ce projecteur s'effectue dans une pièce noire. Chaque forme de lumière réduit l'effet optique. Ne touchez jamais la lentille ou n'essayez jamais de l'adapter. Cet article n'est pas un jouet.— Il procurera à chaque moment un surprenant effet magique dans votre pièce



1. Retirez délicatement le projecteur et l'adaptateur de l'emballage.
2. Placez le projecteur sur une table ou une surface plane, insérez la fiche de l'adaptateur dans l'adaptateur secteur jack. Assurez-vous que le commutateur ON/ OFF est en position OFF lors du branchement de l'adaptateur dans la prise murale. Branchez dans la prise de courant.
3. Positionnez le projecteur de sorte que la lentille de projection soit dirigée vers le plafond.
4. Allumez le projecteur en mettant sur ON. 2 possibilités vous sont offertes:
 - Mouvement des nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud Bright Ness complètement vers la droite. Vous pourrez voir les nuages se mouvoir dans le centre.
 - Sans nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud Bright Ness vers la gauche. Vous obtenez un ciel noir sans nuages ou apparaissent de nombreuses petites étoiles magiques. Si vous regardez de plus près vous verrez même des étoiles filantes. C'est un excellent moyen de se détendre et de transformer n'importe quelle pièce en un cadre magique.
5. Après avoir fait l'expérience au plafond, vous pouvez essayer sur un mur blanc.
6. Assurez-vous de placer l'appareil sur OFF lorsque vous quittez la pièce. **Attention ! Ne pas utiliser l'appareil plus de 4 heures d'affilées.** Ceci rallongera considérablement la durée de vie de votre appareil.

Pour obtenir un résultat optimal, la projection devra se faire sur un plafond ou un mur blanc. Les surfaces sombres réduiront l'effet escompté.

7. Entretien

- Ne touchez pas les lentilles à mains nues.
- Nettoyez la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon humide propre.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas de détergents.

8. Sécurité

Ne jamais regarder en direction de la lumière du projecteur.

1. Nom du produit

Projecteur Nenko

2. Code du produit

23157130

3. Brève Description

Ce projecteur Nenko contient un moteur rotatif intégré qui est compatible aussi bien avec des roues liquides magnétiques que non magnétique. Un adaptateur permettant ceci est inclus. Le moteur rotatif contient 4 vitesses

www.nenko.com






différentes, 2tpm, 1,5tpm, 1tpm, 0,5tpm. Un support permettant le poser sur une table et une fixation au plafond sont compris. A l'arrière du projecteur se trouve un interrupteur marche/arrêt. Le projecteur est compatible avec le contacteur à couleurs sans fil Nenko. Fonctionne à 12V. Le projecteur est livré sans roue liquide. Dimensions : 31 x 23 x 22 cm

1. Nom du produit

Disque magnétique – Poisson tropicaux

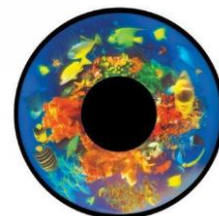

2. Code du produit

22367130

1. Nom du produit

Disque magnétique – Quatres Saisons



2. Code du produit

22358130

1. Nom du produit

Disque magnétique – Lever de soleil



2. Code du produit

22344130

1. Nom du produit

NENKO Interactif Source lumineuse LED

2. Code du produit

18517

3. Couleur

Blanc

4. Description

Cette source lumineuse LED de qualité et d'une fiabilité optimale, est simple d'utilisation et se branche sur la la gerbe de fibres optiques (non comprises). Pour l'usage dans l'obscurité, elle vous permet de programmer rapidement et simplement. Vous pouvez ainsi choisir la fréquence de changement de couleur ou rester sur une couleur fixe.

Ce produit est compatible avec tout notre assortiment "Nenko interactif" comme le contacteur interactif Nenko (a commander séparément).



5. Contenu

1 x source lumineuse

1 x câble d'alimentation

www.nenko.com

6. Stimulations Snoezelen

Vue

7. Sûreté

- Pour usage à l'intérieur dans des pièces non-humides.
- N'essayez pas à ouvrir le boîtier, il contient des pièces électroniques sensibles.
- Placez la source lumineuse à un endroit bien ventilé et ne le couvrez pas car l'appareil peut devenir chaud.
- N'accrochez rien que la gerbe de fibres optiques dans l'ouverture sur le devant du boîtier.
- Utilisez que l'adaptateur qui fourni avec l'appareil.
- Installer ce générateur de lumière hors de portée des usagers.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit, surtout avec des fibres optiques.
- Lorsque vous enlevez les fibres optiques, enlevez le manche avec soin, déserrez la vis. Ne jamais tirer le manche du tuyau avec vigueur.

8. Caractéristiques Techniques

Dimensions:	18 x 8 x 5cm, fil 175cm long
Poids:	470g
Alimentation:	100-240v AC 50/60Hz 0.25A
Puissance de sortie:	12v DC 1.25A 15W max
CE:	BS EN 9001-2000

9. Installation

Pas 1 :

Déballez le produit avec precaution.


Pas 2 :

1. Attachez l'embout de la gerbe de fibres optiques, dans l'ouverture sur le devant de la source lumineuse.
Avant de faire ainsi, assurez-vous que la vis sur le dessus de la source, est bien dévissée, pour que la gerbe de fibres optiques, rentre aisément.
2. Enfoncez la gerbe de fibres optiques le plus possible dans l'ouverture de la source lumineuse. Il se peut que vous devriez le bouger en tournant, pour bien pouvoir rentrer l'anneau intérieur comme celle de l'extérieur.
3. Revissez la vis au-dessus de la source, pour bloquer la gerbe de fibres optiques à la source lumineuse.



Pas 3 :

Déballez le câble d'alimentation et choisissez la bonne adaptateur qui correspond à votre prise. Posez l'adaptateur d'une côté, glissez-la jusqu'au fond et clipser-la. Voir ci-dessous.

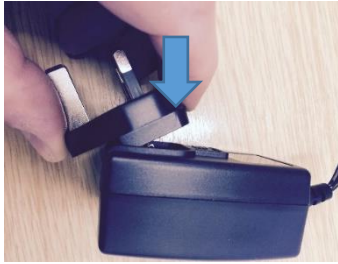


Pas 4 :
Introduisez l'embout du câble d'alimentation à l'arrière de la source lumineuse, en le poussant pour qu'il soit bien enclenché.

Pas 5 :
Branchez la prise au secteur.



Pas 6 :
Allumez / éteignez la source lumineuse en vous servant de l'interrupteur à l'arrière de la source lumineuse.

10. Fonctionnement

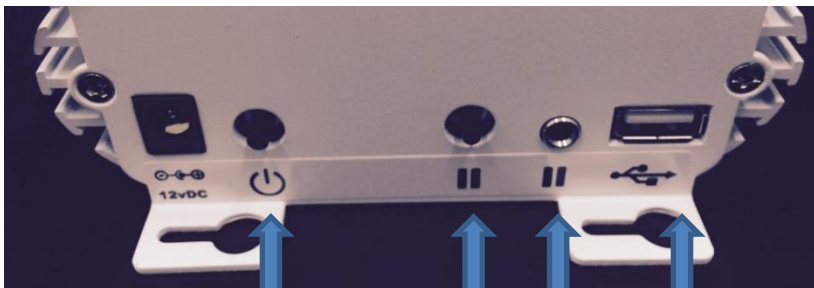

Allumer /
Eteindre

Pause /
connexion

Entrée
contacteur

Sortie USB

Allumer/éteindre

Utilisez cette interrupteur pour l'allumer ou éteindre

Pause

Appuyez brièvement sur cette interrupteur pour arrêter le défilement des couleurs. Appuyez de nouveau pour le reprendre.

Connexion

Maintenez cette interrupteur enfoncé pendant 7 secondes pour que la source s'illumine en rose. L'appareil est maintenant activé en 'mode connexion'. Dans ce mode, l'appareil clignote en rose en attendant un signal du contacteur interactif Nenko (22009 – non compris). Appuyez de nouveau pendant 7 secondes pour annuler ce mode.



Entrée contacteur

Même fonction que 'Pause / connexion' mais effectué par un contacteur interactif Nenko, en le branchant par une prise jack 3,5mm (non-compris). Renseignez-vous sur les possibilités.

USB

Cette sortie n'est pas encore utilisée, ni pré-programmée.

1. Nom du produit


Fibre optique en plastique 100x2m

2. Code du produit

17905

3. Description

La gerbe de fibres optiques est un élément clé de tout environnement multi-sensoriel. Les fibres ont une sollicitation au niveau visuel et tactile. Même pour les personnes déficientes visuelles, les fibres optiques permettent de percevoir la lumière différemment. Par le crépitement de la lumière des fibres optiques, le patient peut se laisser captiver, intriguer. Les longs filaments peuvent être tressés, noués, enroulés etc...

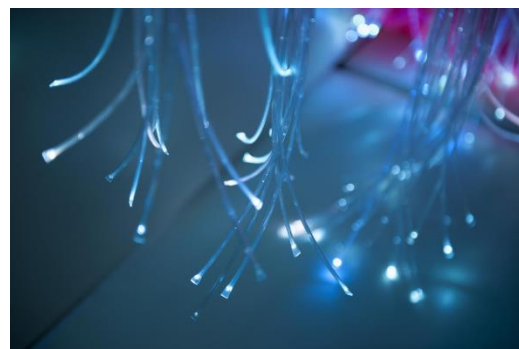

4. Contenu

1x fibre optique en plastique

5. Stimulations Snoezelen

Vue

6. Sûreté

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit. Les fibres optiques ne posent pas de risques, mais elles doivent être utilisées sous la direction professionnelle, en prenant toutes des précautions nécessaires. Nenko n'est pas responsable pour les blessures ou dommages causés par l'abus ou l'usage impropre de ses produits.
- On peut caresser le visage avec les fibres optiques, mais ne jamais les introduire dans la bouche. Ces fibres optiques en plastiques sont vraiment robustes, mais on ne devrait pas encourager les usagers à mordre les fibres optiques.

7. Caractéristiques Techniques

Tuyau: 30mm de diamètre

Fibres : ces fibres sont plus épaisses que les fibres optiques en verre

Poids : ex. 17901 – 1 kg ; 17905 – 2 kg ; 17907 – 3 kg ; 17908 – 4 kg

8. Installation

1. Enlevez l'emballage et les attaches temporaires qui tiennent les fibres ensemble.
2. Glissez le manche dans le tuyau métallique sur la face de devant de la source lumineuse.
3. Prière de voir les notices pour la Source Lumineuse.



9. Usage

Suggestions pour l'usage des fibres optiques

Utilisée avec une source lumineuse, la gerbe change de couleur en permanence sur toute sa longueur. Les variations de couleur incitent l'utilisateur à fixer son attention et procurent un effet calmant.

On suggère les usages suivants :

1. Attachez la source à un mur pour suspendre les fibres optiques comme une fontaine.
2. Caressez les fibres pour indiquer qu'on peut les toucher sans danger.
3. Étalez les extrémités des brins pour projeter de la lumière sur la main ou le visage.
4. Étalez les brins sur un tapis ou un fauteuil et laissez le client à s'étendre sur les brins.
5. Laissez le client à s'en draper dans les brins.
6. Entrelacez les brins dans votre pull ou dans un filet attaché au mur.
7. Utilisez les fibres optiques d'une manière interactive en vous servant d'un appareil de contrôle

10. Soin et Entretien

- De temps en temps, essuyez les fibres avec un torchon légèrement humecté - éteignez la source lumineuse avant de les nettoyer. Servez-vous d'un chiffon légèrement humecté et un produit de nettoyage doux. Ne pas humecter le tuyau. Sécher bien les fibres optiques avant de les utiliser de nouveau. Ne pas immerger les fibres optiques dans l'eau.
- Ne pas marcher sur les fibres optiques ou les coincer ou les tordre de façon lourde. Dès que la fibre soit déformée, la lumière ne passera plus au bout du brin.

1. Nom du produit

Colonne à bulles Relaxer 125x10 cm

2. Code du produit

19278

3. Description

C'est une colonne à bulles avec un format spécial, adapté pour ce chariot snoezelen.



5. Contenu

La colonne à bulles avec la base, lampe RVB - LED, pompe à membrane, clapets anti-retour, le transformateur plugin.

6. Stimulations Snoezelen

Vue

7. Installation

- Avant la mise en service de la colonne à bulles, veuillez à ce que la colonne soit déposée sur une surface plate et stable.
- Déballez tous les éléments avec soin.
- Vérifiez si les tuyaux et la colonne à bulles sont imperméables en ajoutant ½ litre d'eau déminéralisée.

www.nenko.com



- Il ne doit pas y avoir de fuite d'eau. Si c'est le cas, contactez-nous immédiatement.

8. Usage

- Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée pour remplir la colonne à bulles et allumez la colonne à bulles.
- Remplissez la colonne à bulles jusqu'à 40 mm en dessous du haut de la colonne avec de l'eau déminéralisée.
- Attention : lors du remplissage, veillez à ce qu'il n'y a pas d'eau qui coule à l'extérieur du tube.
- Nettoyez le tube en plexiglas avec un chiffon doux et de l'eau (par exemple chiffon Microfibre).
- La baisse du niveau d'eau pendant l'utilisation ne signifie pas qu'il y a une fuite, mais peut s'expliquer par l'évaporation normale. Par conséquent, vous devez régulièrement ajouter de l'eau déminéralisée dans la colonne à bulles.
- Si l'eau deviendrait laiteuse et trouble, ou s'il y a des formations d'algues, changez complètement l'eau. En cas de forte pollution de l'eau, il est également nécessaire de nettoyer soigneusement la colonne à bulles.
- Pour éviter tout dégât d'eau, nous vous recommandons de remplacer les deux clapets anti-retour tous les 12 mois.

9. En cas de problèmes

4 Lampes LED

Si votre ampoule LED est défectueuse, remplacez-la par la lampe LED. Nous vous conseillons d'en avoir une en réserve. Ces lampes sont disponibles chez Nenko. La lampe LED ne peut pas dépasser 12 V / AC 5 W, pour éviter la surcharge du transformateur plugin. La lampe LED est pré réglée avec un changement lent des couleurs RVB.

10. Général

Malgré un traitement soigné et l'assurance de la qualité, il est possible que la colonne d'eau fuit. Avant de remplir la colonne avec de l'eau, contrôlez si la colonne à bulles n'est pas endommagée.

Lors de la première utilisation, veuillez faire fonctionner la colonne à bulles sous surveillance. Les premières fois que vous branchez et débranchez la colonne à bulles, il est important de vérifier que l'eau ne sort pas de la colonne.

Toutes modifications apportées à la technique et à la structure de la colonne à bulles nécessitent une consultation préalable avec le fabricant, sinon la garantie ne serait plus valable.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la fuite de la colonne à bulles, ou par le non-respect de ces instructions.

Si ces instructions ne sont pas respectées, la garantie n'est plus valable.

En cas de réclamations, veuillez nous communiquer la date d'achat et le numéro de série.

Important : pendant les activités mentionnées ci-dessus, retirez toujours la fiche de la prise électrique !



11. Accessoires (A commander séparément)

NENKO Interactif Contacteur - 22009

Avec ce contacteur Nenka interactif le patient peut contrôler la couleur dans l'espace et activer ou non les bulles de la colonne à bulles.



Nenka, les colonnes interactives néon LED Nenka, la source lumineuse des fibres optiques, le tunnel de profondeur Nenka, la boule lumineuse LED interactive intégrée Nenka et les bandes de lumière LED Wi Fi.

12. En cas de problèmes

Problème: Il n'y a pas de lumière

- Vérifiez que le câble d'alimentation soit bien introduit dans la source lumineuse
- Vérifiez le fusible à l'arrière de la source lumineuse
- Vérifiez qu'il n'y a pas de prise male dans la prise femelle à 5 fiches qui se trouve à l'arrière de la source lumineuse.
- Eteignez la source lumineuse, attendez une minute et puis allumez la source lumineuse de nouveau.

Problème: La lumière n'est pas très vive

- Vérifiez que le manche des fibres optiques soit bien introduit dans le tuyau au devant de la source lumineuse.
- Serrez la vis au-dessus pour retenir les fibres optiques.

Problème: Quelquefois la lumière change de couleur au hasard

Si quelqu'un d'autre utilise un autre appareil de contrôle WiFi dans une salle voisine, il est possible que votre source lumineuse répond à l'autre appareil.

Problème: Les signales Wi Fi de deux salles voisines se confondent l'un avec l'autre

Contactez-nous. Nous pouvons fournir un autre appareil pour éviter de l'interférence.

1. Nom du produit

Tablette de chlore 1.8g pour colonne

2. Code du produit

814316

3. Description

Remplissez la colonne à bulles d'eau du robinet et ajoutez un ou plusieurs comprimés de chlore pur, à raison de 1 comprimé de 1,8 grammes pour 10 litres d'eau. Au début ceci peut dégager une odeur désagréable. L'activité du chlore reste efficace entre un et six mois.





4. Usage

Mode d'emploi Tablettes de chlore

ENTRETIEN

Afin de garder l'eau pure et propre nous vous conseillons :

Option 1= remplissez la colonne avec de l'eau déminéralisées

Option 2= remplissez la colonne avec de l'eau courante et ajoutez les tablettes de chlore = 1 tablette de 1.8 gr par 10 l d'eau (odeur désagréable au début).

Colonne à bulles de: Hauteur	Diamètre	Litres	Tablettes
100 à 150 cm	x 15 cm	± 15-22 l	2 tablettes
170 à 220 cm	x 15 cm	± 25-33 l	3 tablettes
120 cm	x 20 cm	± 32 l	3 tablettes
150 cm	x 20 cm	± 39 l	4 tablettes
170 à 200 cm	x 20 cm	± 45-52 l	5 tablettes
220 cm	x 20 cm	± 59 l	6 tablettes

Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com.