

Mise en service Chariots snoezelen

1. Vous recevrez le chariot sensoriel dans une caisse en bois, comme indiqué ci-dessous.
2. La caisse est assemblée avec des vis. Dévissez la plaque de bois avant, puis sortez le chariot à 2 personnes à cause du poids et pour éviter tout dommage.
3. Ensuite, le film peut être retiré du plexiglas pour l'aquarium / écran (selon votre version de chariot)
4. Retirez la clé et ouvrez la porte.



5. Faites de même pour l'arrière du chariot. Cette clé est suspendue avec une attache dans l'ouverture de la porte (la poignée). *(la clé du chariot stimulation des sens se trouve sur le dessus du chariot (44502010)).*
6. Vous pouvez incliner la partie arrière vers le haut en appuyant sur le repose-pieds, de sorte qu'il est plus facile d'entrer / sortir cette partie.
7. Maintenant, remplissez la colonne à bulles avec de l'eau, veillez à ne pas le remplir trop plein ou à verser de l'eau à l'extérieur du tube, pour éviter d'endommager les pièces électroniques. Voir plus d'instructions pour les tubes à bulles sur notre site Web.

Attention! **Ne connectez pas encore le chariot s'il n'est pas encore rempli d'eau!**



8. Retirez tous les produits de l’emballage et connectez les câbles correspondants (sortant en haut du chariot) aux produits selon la carte.
9. La prise de la partie arrière avec la colonne à bulles, peut être connecté sur le côté du chariot sensoriel.



10. Dans l’armoire, il y a un panneau de commutation. Cela vous permet d’allumer / éteindre les produits
ATTENTION! Les articles eux-mêmes peuvent également avoir un bouton marche / arrêt.



Pour le diagramme de fonctionnement, voir le diagramme fourni.

11. Connectez le chariot au secteur et est maintenant prêt à l’emploi!

