



1. Nom du produit

Chariot Snoezelen Sense System

2. Code du produit

21981010

3. Brève description

Ce chariot Snoezelen Sense System est livré sur une palette pour des raisons de sécurité et de service.

= Nous recommandons de conserver la caisse de transport en bois fournie pour d'éventuelles opérations de service =

1. Ouvrez la palette avec précaution.
2. Déverrouillez les freins des roulettes avant situées sous le chariot Snoezelen et faites descendre le chariot de la palette.
3. Suspendez le faisceau de fibres optiques à côté du chariot.
4. La clé permettant d'ouvrir l'avant et l'arrière du chariot Snoezelen est située sur le dessus du chariot.
5. Ouvrez la porte du compartiment inférieur à l'avant du chariot Snoezelen.
6. Sortez le vidéoprojecteur, le spot LED et le projecteur laser Star de l'armoire et placez-les sur le chariot.
7. Connectez la tablette au vidéoprojecteur à l'aide du câble HDMI fourni.
8. La tablette se connecte automatiquement au contrôleur Bluetooth.
9. Connectez le spot lumineux situé sur le dessus du chariot au câble noir épais.
10. Sortez le câble d'alimentation de 3 mètres de l'armoire. Branchez une extrémité dans la prise située à l'extérieur du chariot Snoezelen (côté droit vu de face) et l'autre extrémité dans une prise murale de la pièce où le chariot sera utilisé.
11. Sortez ensuite l'adaptateur (connexion pour la colonne à bulles) de l'armoire et branchez-le dans l'autre prise située à l'extérieur du chariot Snoezelen, sous le faisceau de fibres optiques.
12. Ouvrez maintenant également l'arrière du chariot Snoezelen à l'aide de la clé fournie. Vous y trouverez une partie extractible avec la colonne à bulles et un miroir à l'arrière.
13. Placez la partie extractible avec la colonne à bulles à côté du chariot Snoezelen et bloquez les roulettes avant utilisation.
14. Remplissez la colonne à bulles à 80 % avec de l'eau afin de laisser suffisamment d'espace pour les bulles.
15. Branchez l'autre extrémité du petit câble d'alimentation, placé à l'extérieur du chariot, dans la colonne à bulles afin qu'elle soit également alimentée.
16. Ouvrez ensuite à nouveau le compartiment avant du chariot Snoezelen. Dans ce compartiment se trouve un boîtier de commande avec 6 boutons rouges. Ces boutons sont les interrupteurs marche/arrêt des appareils électroniques utilisés dans et sur le chariot Snoezelen. Le schéma fourni indique clairement quel bouton correspond à quel appareil (de gauche à droite).

Attention : branchez toujours d'abord la fiche du chariot Snoezelen dans la prise murale, puis allumez ensuite les boutons rouges.

Bouton 1 : Colonne à bulles

Bouton 2 : Fibres optiques

Bouton 3 : Tablette + amplificateur + mini vidéoprojecteur

Bouton 4 : Projecteur Star light

Bouton 5 : Spot

Bouton 6 : Diffuseur d'arômes

17. Le chariot Snoezelen est maintenant prêt à être utilisé.





4. Stimulation des sens

Toucher, odorat, ouïe et vue

5. Specificaties

Dimensions : 60 x 70 x 145 cm

Alimentation : 220 V

6. Inclus

Tout comme illustré

- Comprimés de désinfection pour colonnes à bulles (1 set de 5)
- Cartouche d'huile supplémentaire pour diffuseur d'arômes
- Source lumineuse LED Nenko pour fibres optiques
- Coffret de parfums avec 4 mélanges d'huiles parfumées
- Support mural pour écran Sense
- Support pour vidéoprojecteur

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.be

