

1. Nom du produit

Chariot pour matériels Snoezelen

2. Code du produit

44502010

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Chariot mobile complet et compact contient tout le matériel nécessaire pour commencer les sessions de Snoezelen. Tous les produits électriques sont déjà raccordés ; il suffit de brancher la prise du chariot et tout fonctionne !

Comprend le système de musique Hifi avec lecteur CD, haut-parleurs intégrés, fibres optiques avec source lumineuse interactive, colonne à bulles Relaxer et le projecteur spatial. Les 4 boîtes de rangement colorées comportent des sets de sens contenant des produits variés pour la stimulation sensorielle, triés par sens (vue, ouïe, toucher et l'odorat). La colonne à bulles peut être placée sur le dessus du chariot : il est possible de fermer les portes du chariot pendant une session de Snoezelen. Après la session vous pouvez facilement ranger la colonne à bulles dans le chariot.

Dimension : 62 x 93 x 125 cm de hauteur.



1. Nom du produit

Colonne à bulles relaxer 80x10 cm

2. Code du produit

19126095

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Cette colonne est décorative, non interactive qui change progressivement de couleur.

Parfait pour les personnes passives, ne souhaitant pas trop de détails.

Idéal pour les salles d'attente et les salons.

Ne pas compatible avec des contacteurs.

Dimensions : 80 x 10 cm

Cette colonne à bulles contient environ 7L d'eau.





5. Contenu

1x colonne à bulles

1 x adaptateur

6. Stimulation sensorielles

Stimule le sens de la vue.

7. Instructions avant l'utilisation

- * Avant d'utiliser la colonne à bulles, placez-la sur une surface plate et stable.
- * Avant remplissage, contrôlez si le tuyau d'air se trouvant dans le socle est bien fixé. Vous pouvez l'atteindre en dévissant le couvercle plastique et tirez le vers le haut. Après vérification vous pouvez revisser la cache plastique.
- * Attachez ensuite le câble d'alimentation au socle.
- * Assurez-vous que le raccordement du tuyau et la colonne à bulles soient étanches en remplissant d'abord une demi-litre d'eau déminéralisée. Il ne doit pas y avoir de fuite d'eau nulle part. S'il y a de l'eau qui coule, contactez- nous !

8. Informations techniques

Dimensions : 80 cm en hauteur x 10 cm de diamètre

9. Installation

- * Utilisez de l'eau déminéralisée ou de l'eau avec les tablettes de chlore pour remplir la colonne à bulles et branchez la colonne au remplissage.
- * Avant démarrer, connectez le transformateur à la colonne à bulles.
- * Placez la prise du transformateur à l'arrière de la colonne à bulles.
- * Remplissez le tube jusqu'à 40 mm en-dessous du bord supérieur.
- * **Attention !** Lors du remplissage, l'eau ne doit pas couler vers les côtés extérieurs.
- * Nettoyez la colonne en plexiglas uniquement avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).
- * En raison de l'évaporation de l'eau, il est nécessaire remplir le tube de temps en temps.
- * Au fil du temps, l'eau peut devenir trouble. Dans ce cas, videz le tube entièrement, nettoyez-le à fond et remplissez à nouveau.

Régularisation des bulles d'air

A l'arrière de la colonne à bulles il se trouve un bouton pour régler le volume d'air. Pour réduire les bulles, tournez le bouton dans le sens horaire. Pour augmenter les bulles, tournez le bouton contre le sens horaire. De cette façon vous pouvez également régler le bruit des bulles.

10. Résolutions

Malgré un traitement soigné et l'assurance de la qualité, il est possible que la colonne d'eau fuit. Avant d'utiliser la colonne à bulles, vérifiez bien s'il n'y a pas d'endommagements.

La colonne à bulles ne peut être utilisée que sous surveillance.

Vérifiez régulièrement que l'eau ne passe pas hors de la colonne à bulles ou derrière le clapet anti-retour.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage de l'eau, causé par la colonne à bulles.

En cas de réclamation, merci de nous communiquer le numéro de la facture et le numéro de série.



1. Nom du produit

Tablette de chlore 1.8g pour colonne

2. Code du produit

814317961

3. Description

Remplissez la colonne à bulles d'eau du robinet et ajoutez un ou plusieurs comprimés de chlore pur, à raison de 1 comprimé de 1,8 grammes pour 10 litres d'eau. Au début ceci peut dégager une odeur désagréable. L'activité du chlore reste efficace entre un et six mois.



4. Usage

Mode d'emploi Tablettes de chlore

ENTRETIEN

Afin de garder l'eau pure et propre nous vous conseillons :

Option 1= remplissez la colonne avec de l'eau déminéralisées

Option 2= remplissez la colonne avec de l'eau courante et ajoutez les tablettes de chlore = 1 tablette de 1.8 gr par 10 l d'eau (odeur désagréable au début).

Colonne à bulles de: Hauteur	Diamètre	Litres	Tablettes
100 à 150 cm	x 15 cm	± 15-22 l	2 tablettes
170 à 220 cm	x 15 cm	± 25-33 l	3 tablettes
120 cm	x 20 cm	± 32 l	3 tablettes
150 cm	x 20 cm	± 39 l	4 tablettes
170 à 200 cm	x 20 cm	± 45-52 l	5 tablettes
220 cm	x 20 cm	± 59 l	6 tablettes



1. Nom du produit

Système musique HiFi avec CD / USB

2. Code du produit

21986101

3. Description

Avec les caractéristiques suivantes :

- Haut-parleurs 35W
- tuner FM
- Entrée audio analogique
- Sortie micro
- port USB
- télécommande



Modèle peut varier - contactez-nous pour les spécifications actuelles.

Dimensions : environ 29 x 22 x 10 cm.

1. Nom du produit

NENKO Interactif Source lumineuse LED

2. Code du produit

18517112

3. Couleur

Blanc



4. Description

Cette source lumineuse LED de qualité et d'une fiabilité optimale, est simple d'utilisation et se branche sur la la gerbe de fibres optiques (non comprises). Pour l'usage dans l'obscurité, elle vous permet de programmer rapidement et simplement. Vous pouvez ainsi choisir la fréquence de changement de couleur ou rester sur une couleur fixe.

Ce produit est compatible avec tout notre assortiment "Nenko interactif" comme le contacteur interactif Nenko (à commander séparément).

5. Contenu

- 1 x source lumineuse
- 1 x câble d'alimentation

6. Stimulation sensorielle

Vue



7. Sûreté

- Pour usage à l'intérieur dans des pièces non-humides.
- N'essayez pas à ouvrir le boîtier, il contient des pièces électroniques sensibles.
- Placez la source lumineuse à un endroit bien ventilé et ne le couvrez pas car l'appareil peut devenir chaud.
- N'accrochez rien que la gerbe de fibres optiques dans l'ouverture sur le devant du boîtier.
- Utilisez que l'adaptateur qui fourni avec l'appareil.
- Installer ce générateur de lumière hors de portée des usagers.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit, surtout avec des fibres optiques.
- Lorsque vous enlevez les fibres optiques, enlevez le manche avec soin, déserrez la vis. Ne jamais tirer le manche du tuyau avec vigueur.

8. Caractéristiques Techniques

Dimensions:	18 x 8 x 5cm, fil 175cm long
Poids:	470g
Alimentation:	100-240v AC 50/60Hz 0.25A
Puissance de sortie:	12v DC 1.25A 15W max
CE:	BS EN 9001-2000

9. Installation

Pas 1 :

Déballez le produit avec precaution.

Pas 2 :

1. Attachez l'embout de la gerbe de fibres optiques, dans l'ouverture sur le devant de la source lumineuse. Avant de faire ainsi, assurez-vous que la vis sur le dessus de la source, est bien dévissée, pour que la gerbe de fibres optiques, rentre aisément.
2. Enfoncez la gerbe de fibres optiques le plus possible dans l'ouverture de la source lumineuse. Il se peut que vous devriez le bouger en tournant, pour bien pouvoir rentrer l'anneau intérieur comme celle de l'extérieur.
3. Revissez la vis au-dessus de la source, pour bloquer la gerbe de fibres optiques à la source lumineuse.



Pas 3 :

Déballez le câble d'alimentation et choisissez la bonne adaptateur qui correspond à votre prise. Posez l'adaptateur d'une côté, glissez-la jusqu'au fond et clipser-la. Voir ci-dessous.





Pas 4 :

Introduisez l'embout du câble d'alimentation à l'arrière de la source lumineuse, en le poussant pour qu'il soit bien enclenché.



Pas 5 :


Branchez la prise au secteur.

Pas 6 :

Allumez / éteignez la source lumineuse en vous servant de l'interrupteur à l'arrière de la source lumineuse.



10. Fonctionnement

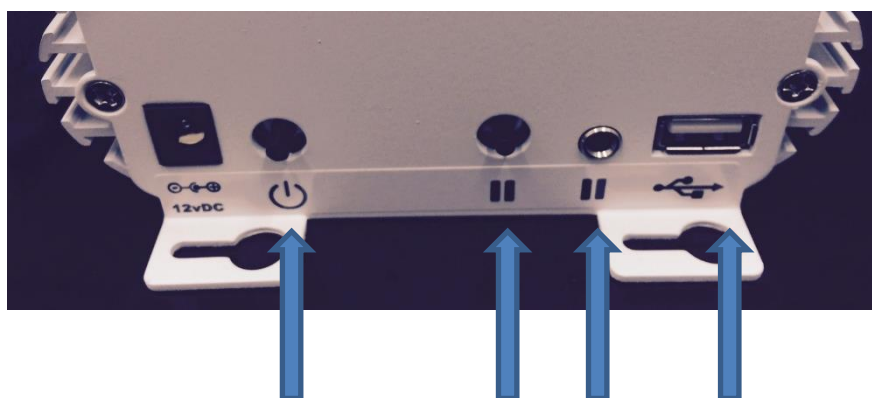

Allumer /
Eteindre

Pause /
connexion

Entrée
contacteur

Sortie USB

Allumer/éteindre

Utilisez cette interrupteur pour l'allumer ou éteindre





Pause	Appuyez brièvement sur cette interrupteur pour arrêter le défilement des couleurs. Appuyez de nouveau pour le reprendre.
Connexion	Maintenez cette interrupteur enfoncé pendant 7 secondes pour que la source s'illumine en rose. L'appareil est maintenant activé en 'mode connexion'. Dans ce mode, l'appareil clignote en rose en attendant un signal du contacteur interactif Nenko (22009 – non compris). Appuyez de nouveau pendant 7 secondes pour annuler ce mode.
Entrée contacteur	Même fonction que 'Pause / connexion' mais effectué par un contacteur interactif Nenko, en le branchant par une prise jack 3,5mm (non-compris). Renseignez-vous sur les possibilités.
USB	Cette sortie n'est pas encore utilisée, ni pré-programmée.

11. Accessoires (A commander séparément)

NENKO Interactif Contacteur - 22009

Avec ce contacteur Nenko interactif vous pouvez contrôler la couleur dans l'espace des éléments interactifs présents (non pas la colonne à bulles de ce chariot).



Nenko, les colonnes interactives néon LED Nenko, la source lumineuse des fibres optiques, le tunnel de profondeur Nenko, la boule lumineuse LED interactive intégrée Nenko et les bandes de lumière LED Wi Fi.

12. En cas de problèmes

Problème: Il n'y a pas de lumière

- Vérifiez que le câble d'alimentation soit bien introduit dans la source lumineuse
- Vérifiez le fusible à l'arrière de la source lumineuse
- Vérifiez qu'il n'y a pas de prise male dans la prise femelle à 5 fiches qui se trouve à l'arrière de la source lumineuse.
- Eteignez la source lumineuse, attendez une minute et puis allumez la source lumineuse de nouveau.

Problème: La lumière n'est pas très vive

- Vérifiez que le manche des fibres optiques soit bien introduit dans le tuyau au devant de la source lumineuse.
- Serrez la vis au-dessus pour retenir les fibres optiques.

Problème: Quelquefois la lumière change de couleur au hasard

Si quelqu'un d'autre utilise un autre appareil de contrôle WiFi dans une salle voisine, il est possible que votre source lumineuse réponde à l'autre appareil.





Problème: Les signales Wi Fi de deux salles voisines se confondent l'un avec l'autre
Contactez-nous. Nous pouvons fournir un autre appareil pour éviter de l'interférence.

1. Nom du produit

Fibre optique en plastique 100x2m

2. Code du produit

17905112

3. Description

La gerbe de fibres optiques est un élément clé de tout environnement multi-sensoriel. Les fibres ont une sollicitation au niveau visuel et tactile. Même pour les personnes déficientes visuelles, les fibres optiques permettent de percevoir la lumière différemment. Par le crépitement de la lumière des fibres optiques, le patient peut se laisser captiver, intriguer. Les longs filaments peuvent être tressés, noués, enroulés etc...



4. Contenu

1x fibre optique en plastique

5. Stimulations sensorielles

Vue

6. Sûreté

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit. Les fibres optiques ne posent pas de risques, mais elles doivent être utilisées sous la direction professionnelle, en prenant toutes des précautions nécessaires. Nenko n'est pas responsable pour les blessures ou dommages causés par l'abus ou l'usage impropre de ses produits.
- On peut caresser le visage avec les fibres optiques, mais ne jamais les introduire dans la bouche. Ces fibres optiques en plastiques sont vraiment robustes, mais on ne devrait pas encourager les usagers à mordre les fibres optiques.

7. Caractéristiques Techniques

Tuyau: 30mm de diamètre
Fibres : ces fibres sont plus épaisses que les fibres optiques en verre
Poids : ex. 17901 – 1 kg ; 17905 – 2 kg ; 17907 – 3 kg ; 17908 – 4 kg

8. Installation

1. Enlevez l'emballage et les attaches temporaires qui tiennent les fibres ensemble.
2. Glissez le manche dans le tuyau métallique sur la face de devant de la source lumineuse.
3. Prière de voir les notices pour la Source Lumineuse.

9. Usage

Suggestions pour l'usage des fibres optiques





Utilisée avec une source lumineuse, la gerbe change de couleur en permanence sur toute sa longueur. Les variations de couleur incitent l'utilisateur à fixer son attention et procurent un effet calmant.

On suggère les usages suivants :

1. Attachez la source à un mur pour suspendre les fibres optiques comme une fontaine.
2. Caressez les fibres pour indiquer qu'on peut les toucher sans danger.
3. Étalez les extrémités des brins pour projeter de la lumière sur la main ou le visage.
4. Étalez les brins sur un tapis ou un fauteuil et laissez le client à s'étendre sur les brins.
5. Laissez le client à s'en draper dans les brins.
6. Entrelacez les brins dans votre pull ou dans un filet attaché au mur.
7. Utilisez les fibres optiques d'une manière interactive en vous servant d'un appareil de contrôle

10. Soin et Entretien

- De temps en temps, essuyez les fibres avec un torchon légèrement humecté - éteignez la source lumineuse avant de les nettoyer. Servez-vous d'un chiffon légèrement humecté et un produit de nettoyage doux. Ne pas humecter le tuyau. Sécher bien les fibres optiques avant de les utiliser de nouveau. Ne pas immerger les fibres optiques dans l'eau.
- Ne pas marcher sur les fibres optiques ou les coincer ou les tordre de façon lourde. Dès que la fibre soit déformée, la lumière ne passera plus au bout du brin.

1. Nom du produit

Projecteur Spatial

2. Code du produit

17460130

3. Couleur

Argent

4. Description

Un projecteur compact pour espace sensoriel de petite superficie. Incluant une roue liquide facilement changeable.



5. Contenu

Votre Projecteur Spatial arrivera dans une seule boîte qui contient:

- 1 x 1 x Projecteur Spatial
- 1 x transformateur
- 1 x roue à l'huile (enveloppée)

6. Stimulations Snoezelen

Vue



7. Usage

Pour l'usage dans l'obscurité

8. Fonctionnement

Prière de voir les images dans les notices en anglais

- Mettez le Projecteur sur une surface plate et stable, hors de la portée
- Mettez la roue dans le Projecteur
- Connectez le transformateur et branchez.

9. Description

Un projecteur compact pour espace sensoriel de petite superficie. Incluant une roue liquide facilement changeable. Pour petits budgets. Couleur argent. Un set de quatre roues aux couleurs différentes est disponible.

IMPORTANT: Le Projecteur Spatial n'a qu'un tout petit peu de la puissance des autres projecteurs disponibles chez ROMPA, comme le Projecteur LED. Le Projecteur Spatial a 20W de puissance – le Projecteur LED a 40W. Par conséquent, l'effet du Projecteur Spatial est moins intensif que celui du Projecteur LED. On peut acheter les roues à l'huile additionnelles (17461) chez ROMPA®. N'utilisez que ces roues – les accessoires des Projecteurs LED ne conviennent au Projecteur Spatial. Le Projecteur Spatial convient aux petites pièces (ex. Les chambres) et aux budgets plus modestes.

10. Sûreté

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Pour l'usage à l'intérieur seulement.
- Ce produit n'est pas un jouet – ne pas l'utiliser comme un jouet.
- Le projecteur se chauffe pendant l'usage.
- Ne pas regarder directement dans l'objectif.
- Ne pas secouer la roue.
- Ne pas laisser la roue exposée à la lumière du soleil.
- Prenez soin en touchant la roue parce qu'elle est en verre - ne touchez que le bord en plastique.

11. Caractéristiques Techniques

Ce projecteur est un produit électrique de classe III et conforme aux toutes normes de sécurité pertinentes.


Alimentation: 240/110V

Sortie: 12V

Dimensions: 25cm

La roue est 10cm de diamètre et 9mm d'épaisseur.
Dès que l'huile se chauffe, l'effet change.

Le projecteur spatial a une lampe qui a 2000 heures de fonctionnement. Si la lampe est défectueuse après ce nombre d'heures, elle n'est pas couverte par la garantie

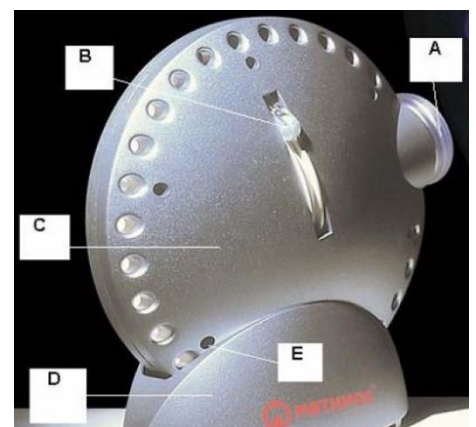


12. Installation

1. Mettez le Projecteur à l'intérieur sur une surface plane et stable. Nous recommandons que vous installiez ce produit à l'écart – sur un rayon par exemple.
2. Mettez la roue à l'huile dans la fente dans le côté du projecteur (B). On entendra un 'déclic' en l'insérant. On ne nécessite pas une roue rotative pour ces roues à l'huile.
3. Connectez le transformateur, branchez et allumez. Ne pas ni renverser ni bloquer le transformateur. Ne pas mettre le transformateur sur de la moquette épaisse.
4. Pour ajuster l'angle du projecteur, tournez la partie circulaire du projecteur (C) dans la base (D). L'effet est meilleure dans une espace aux murs/plafonds blancs, sans lumières. La luminosité et la taille de l'effet dépendent aussi la distance au mur. Mettez le projecteur au point en tournant l'objectif (A).
5. Ne pas utiliser ce produit pendant plus de six heures d'affilée. Avant de toucher le projecteur, il faut le débrancher et le laisser refroidir.
- 6.

13. Soin et Entretien

Nettoyage Débranchez et laissez refroidir le projecteur. Servez-vous d'un chiffon légèrement humecté pour nettoyer l'extérieur du projecteur. Nettoyez l'objectif en vous servant d'un chiffon à objectif. Ne pas toucher le devant de l'objectif.

Pour changer l'ampoule: Si l'ampoule ne s'allume pas (et le fusible fonctionne toujours), remplacez l'ampoule. Débranchez le projecteur et le laissez refroidir complètement). Enlevez la roue à l'huile. Détachez la partie circulaire (C) de la base (D) du projecteur: tenez le projecteur renversé, et placez les clips au centre. Détachez-les en écartant doucement la fente de la base. Ne pas forcer les clips. Tenant la partie circulaire du projecteur (C), enlevez les six vis (E) autour du bord du projecteur. Séparez les deux moitiés du partie circulaire (C) et détachez l'objectif (A). Tirez le connecteur de l'ampoule et dévissez les deux vis de serrage. Changez l'ampoule en vous servant d'une ampoule 50watt 240V GU10. Ces ampoules sont disponibles chez tout bricoleur.

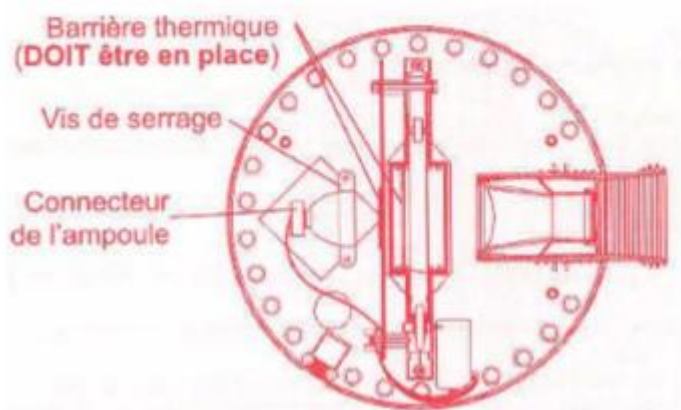

Resserrez les vis de serrage, en veillant à ne pas trop serrer. Poussez doucement le connecteur sur les plots de l'ampoule, et puis reconnectez les deux moitiés, en alignant les six vis (E). Fixez à nouveau l'objectif. Reconnectez la partie circulaire (C) et la base (D). Ne pas mélanger les vis de serrage de l'ampoule et les vis de fixation de la caisse circulaire (les vis de serrage de l'ampoule sont plus courtes).



Snoezelen Set du sens – Entendre 21803115 :

Un set complet du sens ; Entendre; pour stimuler l'ouïe.
Le contenu peut varier.

1. Nom du produit

Clochettes flexibles

2. Code du produit

17114140

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Portez ces clochettes autour du poignet et de la cheville. D'une haute qualité, leur ton est clair et résonnant. Aux attaches velcros réglables. Lot de 4.
Dimensions : 22 cm de long.



1. Nom du produit

CD Pure Relaxation

2. Code du produit

23633100

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Inspiré par la beauté de la nature. Magnifique musique qui nous emmène loin de notre monde vers des espaces lointains et ouverts qui nous calment et nous procurent une paix intérieure.



1. Nom du produit

Boîte sonore animaux - set de 3

2. Code du produit

19373480

3. Couleur

Comme à l'image

4. Brève description





Offre une réponse sonore à un mouvement minimal. Simple à utiliser, il suffit de tourner la boîte pour entendre un mouton ou une vache. Favorise la compréhension de la relation cause effet. Les sons varient.

Dimensions : 6 cm diamètre x 6 cm hauteur.

1. Nom du produit

Balles scintillantes - set de 6

2. Code du produit

15227200

3. Couleur

Comme à l'image



4. Description

Ces balles creuses scintillantes et à rebonds contiennent une clochette. Diamètre : 6 cm, lot de 6.

1. Nom du produit

Gong 20 cm

2. Code du produit

15880140

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Ce tambourin facile à manipuler émet du son rien qu'au léger toucher, donc adapté pour tout âge et niveaux. Baguette inclus. Diamètre : 22 cm.



1. Nom du produit

Tube grondeur

2. Code du produit

18973140

3. Couleur

Les couleurs varient

4. Description

Retourne le tube pour le faire gronder! Donne une récompense auditive par le mouvement. Dimensions : 40 cm long.





1. Nom du produit

Bâton de pluie mini

2. Code du produit

17241140

3. Couleur

couleur selon le stock

4. Description

La chute de ces billes capte la lumière, créant ainsi un effet holographique et présentant une version moderne d'une idée ancienne. Dimensions : longueur 20 cm.



1. Nom du produit

Changeur des voix

2. Code du produit

20391471

3. Couleur

Les couleurs varient

4. Description

Permet une grande variété d'effets sonores lorsque vous parlez. Amplifie et déforme votre voix. Avec éclairage changeant LED. Nombreuses couleurs. Dimension: environ 15 cm.



1. Nom du produit

Tambourin

2. Code du produit

13031140

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

La conception du tambourin fait que la main du joueur se trouve au centre de gravité de l'instrument, ce qui l'équilibre et permet d'obtenir un excellent contrôle avec un minimum d'effort. Une poignée rembourrée le rend facile à tenir. En plastique résistant 27 x 22 x 5 cm.



1. Nom du produit


Œufs tonnerres

2. Code du produit

14659140

3. Couleur

Comme à l'image

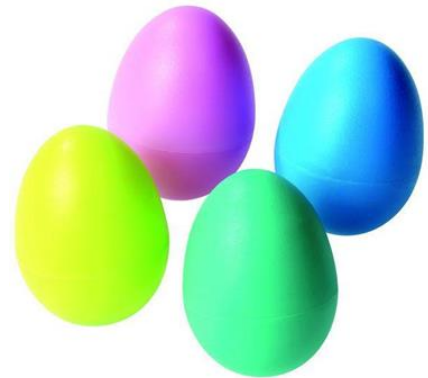

4. Description

Légers et suffisamment petits pour les tenir dans la main ils reproduisent des sons agréables. Fonctionne comme des maracas sans poignée. Les couleurs selon disponibilité du stock. Lot de 6. Dimensions : 5 cm de hauteur.

1. Nom du produit


Balle hérissée lumineuse avec son

2. Code du produit

19240200

3. Couleur

Comme à l'image

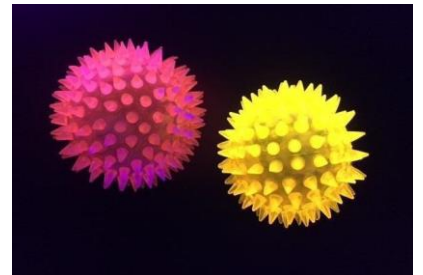

4. Description

Cette balle douce s'illumine à chaque rebond. Cette balle hérissée s'illumine sous l'effet de la lumière UV. Cette balle émet également des sons en le rebondissant. Couleur selon disponibilité

Snoezelen Set du Sens – Sentir 21805115 :

Un set complet du sens ;Sentir; pour stimuler le sens olfactif. Le contenu peut varier.



1. Nom du produit

Disque Aromathérapie

2. Code du produit

CD666

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Mélodies pour créer une ambiance calmante. Allumez le diffuseur et relaxez-vous.



1. Nom du produit

Dé sonore aromatisé

2. Code du produit

18478170

3. Couleur

Comme à l'image



4. Description

Dés multi-sensoriels - tactile, aromatisé et avec des sonnettes à l'intérieur pour une attraction auditive. Couleurs dépendent du stock. A la pièce. Dimensions : 15 x 15 x 15 cm.

1. Nom du produit

Mélange d'arômes Cosmic Chi - 5ml

2. Code du produit

12804

3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts. Mélange d'arôme Cosmic-Chi fin et fruité se compose des arômes de Bergamote, Orange.



1. Nom du produit

Mélange d'arômes Détente - 5 ml

2. Code du produit

12079

3. Description

Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous les goûts. Mélange d'arômes Détente : floral se compose des arômes de Lavande fine, Benzoe Siam, Feuille de Ho, apaisant et équilibrant.



1. Nom du produit

Souris aromatique

2. Code du produit

17047170

3. Description

Un diffuseur portatif, compact et léger. Pour l'aromathérapie en voyage, ou quand il vous manque de l'espace. À brancher, ou à utiliser avec des piles (4 x AA - non inclus).





Silencieux, son ventilateur intégré est capable d'évaporer efficacement les huiles. Aucun risque de brûlure ou de renversement. Comprend 5 recharges et un adaptateur.

1. Nom du produit

Tampons pour souris aromatique - set 10

2. Code du produit

17048170



3. Description

Tampons pour souris aromatique - lot de 10. Un diffuseur portatif, compact et léger pour l'aromathérapie en voyage, ou quand il manque de l'espace. À brancher, ou à utiliser avec des piles. Muni d'un ventilateur silencieux et efficace.

1. Nom du produit

Peluches parfumées chauffables - éléphant

2. Code du produit

21503170



3. Description

Super doux et super sensoriels ! Peuvent être chauffées au micro-onde. Elles sont alourdies de sorte qu'elles sont faciles à tenir dans le creux de votre coude. Avec l'agréable parfum de lavande. Éléphant.

1. Nom du produit

Pâte à modeler aromatique

2. Code du produit

21733170

3. Description

Tactil et aromatique pour calmer ou stimuler. Chaque couleur correspond à une arôme et fonction.



Snoezelen Set du Sens – Toucher 21802115 :

Un set complet du sens ;toucher; pour stimuler le sens du toucher. Le contenu peut varier

1. Nom du produit

Balle hérisson souple 8 cm orange

2. Code du produit

15394190



3. Description

Balle hérisson qui masse légèrement. Utiliser ces balles pour détendre les muscles de la main ou comme outil des exercices d'attrapage. S'utilise également en milieu aquatique. Par pièce.

1. Nom du produit

Balle fluffy lumineuse

2. Code du produit

18815190



3. Description

Cette balle elle est extensible, douce, colorée et s'illumine ! Il suffit de l'appuyer ou de la faire tomber pour activer le clignotement. Couleur selon disponibilité.

1. Nom du produit

Boule masseur LED

2. Code du produit

17604840

3. Couleur

Rouge et bleu



4. Description

Appuyez sur le bouton au milieu et les pieds s'illuminent et se mettent à vibrer. Appliquez-le sur le dos, la nuque, les épaules, les bras et les jambes. Nécessite 3 piles AAA (non fournies). Les couleurs peuvent varier. Par pièce.

Dimension : 10 cm

1. Nom du produit

Sable magique - 1 kg

2. Code du produit

21869

3. Description

Une pâte à modeler souple qui se coupe facilement et laisse des empreintes incroyables. Ce sable magique et cinétique est conçue de 98% sable pur. Ne sèche jamais. Utilisation de longue durée.

Boîte 1 kg.





1. Nom du produit

Balle antistress Manimo - lune

2. Code du produit

29259872

3. Description

Ces balles tactiles anti-stress stimulent les sens et la motricité fine. L'effet lesté offre un sentiment apaisant. Couleurs varient selon la disponibilité. Poids : 110 gr. Dimensions : 8,9 x 8,9 x 4 cm



1. Nom du produit

Tuyau masseur

1. Nom du produit

Rouleau masseur

2. Code du produit

14010840

3. Couleur

Orange

4. Description

Le rouleau de massage est un dispositif souple qui rend un massage bien plus agréable à travers les vibrations. Le rouleau est fait d'un matériau léger et portable. Réglable à deux vitesses.



5. Stimulation sensorielle

Sentir / Toucher

6. Installation

- Pour insérer des piles, faites tourner la poignée du crochet dans le sens anti-horaire.
- Insérez une pile "C" en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Actionner le rouleau qui est en position bas et vous pouvez avoir des vibrations à vitesses plus élevées, tournez le bout vers position «Haut».
- Pour l'éteindre vous le tournez en position "Off".



7. Piles

- les piles doivent toujours être remplacées par un adulte.
- utilisez toujours des piles alcalines pour obtenir les meilleurs résultats. Assurez-vous de vérifier la date de péremption, car de nouvelles piles garantissent une utilisation et une utilisation ininterrompues du produit.
- Retirez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez que les piles fonctionnent et sont insérées correctement, ou essayez de les remplacer par des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines standard, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Veillez à insérer les piles en respectant la polarité et suivez toujours les instructions du fabricant. - Retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec lorsque vous ne les utilisez pas.

8. Sûreté

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ce rouleau masser est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne jamais laisser utiliser le rouleau masser sans surveillance.
- Éteignez toujours le Massagerol lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- Gardez le rouleau masser à l'écart d'une surface chaude ou chauffée.
- N'utilisez pas le rouleau masser de manière continue à un endroit du corps. Il est prévu qu'il soit constamment déplacé sur le corps.
- Ne pas utiliser le rouleau masser de manière continue pendant plus de 20 minutes.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible ou dans un endroit où la circulation sanguine est mauvaise.
- Ne pas placer ou entreposer le rouleau masser dans un endroit où il pourrait tomber dans le bain ou le lavabo.
- Ne pas utiliser le rouleau masser sous la douche ou dans la baignoire.

1. Nom du produit

Grand tortilleur

2. Code du produit

17121431

3. Description

Essayez de rattraper ce tortilleur drôle! Serrez-le et observez comment l'eau bouge!

Dimensions : 12 cm



1. Nom du produit

Mousse étincelante - Set de 4

2. Code du produit

20954830

3. Couleur

Comme à l'image



4. Description

Un jeu amusant par manipulation et pression! La structure favorise la perception sensorielle et le développement de la motricité fine. Les couleurs vives peuvent être mélangées pour créer des tons multicolores. Non toxique. A partir de 3 ans

Dia: 3H x 6.5cm

1. Nom du produit


Anneau hérissé 18 cm de diamètre

2. Code du produit

14434500

3. Couleur

Couleurs selon le stock

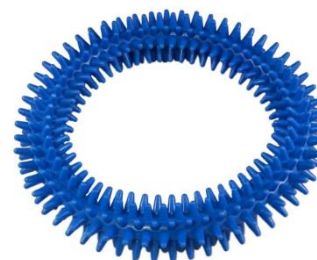

4. Description

Ce grand anneau à picots facile de préhension, peut être utilisé pour lancer, attraper ou pour une activité tactile. Des couleurs varient selon la disponibilité. Dimensions : 18 cm de diamètre.

1. Nom du produit

Rouleaux de massage pour les pieds – set de 2

2. Code du produit

14466840

3. Couleur

Gris

4. Description

Deux rouleaux plastiques à picots doux stimulant la circulation qui vous font bénéficier d'une sensation de bien-être et de détente.



1. Nom du produit

Balle Squishy

2. Code du produit

28383200

3. Description

Serrez-la et vous la sentez glisser entre les doigts. Ensuite elle reprend sa forme d'origine. Tactile et amusant ! Il est conçu pour calmer les nerfs pour des enfants ainsi que des adultes. Utiliser uniquement sous surveillance. Poids : 75 grammes.



1. Nom du produit

Gants tactiles

2. Code du produit

72028481

3. Description

Quand les mains sont mises dans la bouche sans arrêt, ces gants tactiles peuvent être la solution. Les tentacules pelucheux sont très douces. Utilisez ces gants pour rendre des parties hypersensibles insensibles ou pour caresser les bras, le dos, le visage et la nuque pour une expérience sensorielle. Ils sont très amusants comme outil calmant.



Snoezelen Set du Sens – Voir 21804115 :

Un set complet du sens ;voir; pour stimuler la vue. Le contenu peut varier.

1. Nom du produit

Plaques Miroir acrylique coloré - set de 6

2. Code du produit

20510431

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Double attrait visuel - réfléchissants et colorés. Invite à la fascination et à la découverte. Kit de 6. Dimensions : 15 x 15 x 0,15 cm.





1. Nom du produit

Œuf lumineux - set de 4 – petit

2. Code du produit


29954111

3. Couleur

Change de la couleur

4. Description

Cet œuf change lentement de couleur. En appuyant sur un bouton, vous pouvez le bloquer à votre couleur préférée. Comprend une télécommande & piles.

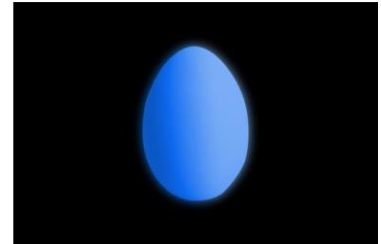

1. Nom du produit

Baguette magique lumineuse

2. Code du produit

15676477

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Flexible et facile à tenir, c'est un complément utile dans une pièce sensorielle. Sept fils de couleur sur un manche en bois pour un effet très fluorescent lorsque ils sont agités sous les UV.

Dimensions : manche 11 cm, fils 30 cm.



1. Nom du produit

Gants brillants

2. Code du produit

20423447

3. Couleur

Comme à l'image

4. Description

Excellent pour utiliser la langue des signes dans l'obscurité.

Facile à utiliser à l'extérieur pendant la nuit, ou pour attirer l'attention dans une pièce sombre. Une fois chargée par le soleil ou par la lumière vive, ces gants donneront environ 2 heures de luminosité à chaque fois.

Taille unique.



1. Nom du produit

Bâtons à spirales scintillantes - set 4

2. Code du produit

17960431

3. Couleur

Les couleurs varient



4. Description

Retourne le et admire une magnifique chute de paillettes! Lot de 4. Dimensions : 29 x 1,5 cm.

1. Nom du produit

Balles scintillantes Arc en Ciel - lot de 7

2. Code du produit

92098200

3. Description

Des paillettes scintillantes qui tourbillonnent à l'intérieur des balles en les jetant ou roulant. Lot de 7 couleurs.



1. Nom du produit

Lampe Torche LED UV

2. Code du produit

18788477

3. Couleur

Comme à l'image



4. Description

Cette lampe torche UV Led est facile à transporter. Permet de travailler avec la lumière UV de proximité. Apporte une stimulation supplémentaire pour des personnes malvoyantes. Fonctionne sur 3 piles AA (non-incluses). Dimensions : 14,5 cm.


1. Nom du produit

Balle hérisson sur bâton

2. Code du produit

23748477

3. Description

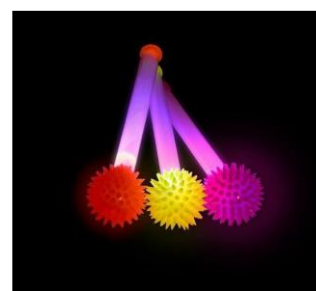



Une balle hérisson sur un bâton. Ce bâton s'illumine dès qu'il touche le sol. Par pièce.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

