



1. Nom du produit

Nenko Chariot snoezelen stimulation des sens

2. Code du produit

44503010

3. Couleur

Blanc



4. Brève description

1. Ouvrez les portes du chariot de matériel Snoezelen.
2. Suspendez le faisceau de fibres optiques au chariot.
3. Sortez le projecteur du meuble et placez-le sur le chariot.
4. Sortez le câble d'alimentation de 3 mètres du meuble. Branchez une extrémité dans la prise située à l'extérieur du chariot Snoezelen (côté droit vu de face) et l'autre extrémité dans la prise murale de la pièce où le chariot sera utilisé.
5. Remplissez la colonne à bulles à 80 % avec de l'eau afin de laisser suffisamment d'espace pour les bulles.
6. Branchez l'autre extrémité du petit câble d'alimentation, qui a été placé à l'extérieur du chariot, dans la colonne à bulles afin qu'elle soit également alimentée.
7. Ouvrez ensuite le meuble avant inférieur du chariot Snoezelen. Dans ce meuble se trouve un boîtier de commande avec 6 boutons rouges. Ces boutons servent à allumer et éteindre les appareils électroniques utilisés dans et sur le chariot Snoezelen. Le schéma fourni (et ci-dessous) indique clairement quel bouton correspond à quel appareil (de gauche à droite).
Attention : branchez toujours d'abord la fiche du chariot Snoezelen dans la prise murale, puis allumez ensuite les boutons rouges.
Bouton 1 : Diffuseur d'arômes
Bouton 2 : Fibres optiques
Bouton 3 : Colonne à bulles
Bouton 4 : Projecteur spatial
Bouton 5 : Système musical
Bouton 6 : Colonne à bulles
8. N'oubliez pas la petite boîte en carton fournie, qui se trouve dans le meuble inférieur. Elle contient la télécommande du lecteur CD, un CD, 1 roue à effets et 2 mélanges parfumés (à utiliser avec le diffuseur d'arômes).
9. Placez une roue à effets dans le projecteur spatial et vérifiez que tous les boutons du projecteur sont sur « marche ».
10. Déposez 4 gouttes d'un des mélanges parfumés sur le tampon aromatique situé en bas du diffuseur d'arômes. Dévissez la partie inférieure du diffuseur, ajoutez 4 gouttes du parfum de votre choix sur le tampon, puis revissez la partie inférieure.
11. Le chariot Snoezelen est maintenant prêt à être utilisé.

5. Stimulations sensorielles

Toucher, sentir, entendre et voir

6. Spécifications

Dimensions: 94 x 62 x 127 cm

Alimentation: 220 V





7. Inclus

- 1 x Chariot de matériel Snoezelen
- 1 x Diffuseur d'arômes
- 1 x Système HiFi avec lecteur CD
- 1 x Source lumineuse
- 1 x Faisceau de fibres optiques
- 1 x Colonne à bulles
- 1 x Projecteur
- 4 x Bacs de rangement
- 1 x Set sensoriel – Ouïe
- 1 x Set sensoriel – Vue
- 1 x Set sensoriel – Toucher
- 1 x Set sensoriel – Odorat

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.be

